

Art. 7500 & 7550 – Cinghie per tavolo operatorio**Caratteristiche**

Ausili realizzati per fissare e posizionare gli arti del paziente o il paziente stesso durante le procedure mediche. I pazienti possono essere fissati o liberati rapidamente grazie al sistema di chiusura a Velcro®.

Impiego

Dispositivi destinati al posizionamento in regione addominale e sugli arti superiori e inferiori del paziente durante una procedura medica.

NON APPLICABILE PER ALTRI SCOPI.

Target

Sale operatorie, reparti di degenza, rianimazioni, pronto soccorso.

Stoccaggio

Conservare in ambiente pulito a temperatura ambiente.


Controindicazioni

Dispositivo non adatto per pazienti psichiatrici, e con propensione al suicidio.

Caratteristiche Tecniche	
Materiale Impiegato:	Fascia in PP e Velcro®, colore nero
Finitura:	Cucitura
Chiusura:	Su porzioni a Velcro®
Pulizia:	Lavabili a max. 40°C con acqua e saponi neutri
Dimensione Cinghia	Art 7500: Lunghezza cm 200 ; Larghezza cm 20 - Confezione: singola Art 7550: Lunghezza cm 80 ; Larghezza cm 12 - Confezione: busta da 2 pezzi

Modo d'Uso

Art.
7500

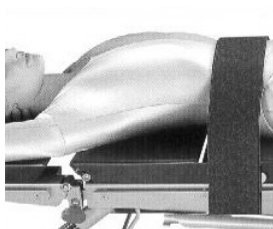

Art.
7550



Art. 7500 - Posizionare il paziente sul tavolo operatorio. Fissare la cinghia al rail porta accessori su un lato del tavolo operatorio. Passare la cinghia sul paziente e fissare al rail controlaterale; trazionare il necessario per il corretto mantenimento della posizione. Chiudere la cinghia fissando e posizionando il terminale in Velcro sulla stessa.

Art. 7550 - Aprire la cinghia ed avvolgere il settore del tavolo operatorio ed il distretto anatomico del paziente. Chiudere con moderata tensione la cinghia con la porzione Velcro.

LATEX FREE**Dispositivo Medico di Classe I**

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.

COREMEC S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.
COREMEC S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it

**COREMEC s.r.l.**

Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
ST7500-7550_Edizione _r1_2011