

COR-Hygienic Gloves *Sistema completo per la detersione del corpo*

Codice Articolo	CHW8.G
Regolam. Europeo	CE 1223/2009
CPNP Ref.	2323011

Sistema monouso per la detersione del corpo del paziente. I guanti *Cor-Hygienic Gloves* rappresentano la soluzione ideale per l'impiego in ambiente sanitario-ospedaliero e domiciliare.

Art. CHW8.G Confezionamento in busta dispenser da 8 guanti - Cartone da 24 buste

Indicazioni d'uso e peculiarità:

Sistema monouso per un efficiente lavaggio e detersione del paziente allettato, pulisce, rinfresca, idrata e protegge. Non contiene profumo.

Previene le irritazioni ed infiammazioni, i rischi di ulcere da decubito, le micosi e la disidratazione cutanea. Indicato anche per cute fragile, area periorbitale e mucose.

La soluzione imbibente si dimostra efficace anche per l'azione anti-odore.

Materiali e composizione:

Guanto in tessuto gofrato, composto al 100% da TNT

(spunch nonwoven), piegato per comfort e velocità di utilizzo.

Dimensioni guanto mm 440x 155 (± 2%)

Peso 100 g/m² ± 8%

Soluzione imbibente: 20,25 gr x guanto ± 2%

**Ingredienti:**

aqua, glycerin, phenoxyethanol, sodium benzoate, cocamidopropyl betaine, benzoic acid, citric acid, dehydroacetic acid, ethylhexylglycerin, tocopheryl acetate, propylene glycol, aloe barbadensis leaf extract, diazolidinyl urea

Confezionamento:

Busta dispenser richiudibile realizzata con il migliore materiale disponibile in commercio dedicato a prodotti umidificati: minima evaporazione, massima integrità e durata del prodotto.

Indicazioni d'uso multilingua, italiano incluso. Simbologia internazionale in etichettatura.

Dimensioni busta dispenser mm 210 x 115 x 33 - 208 g ± 5%

Riscaldamento del prodotto:

La busta dispenser può essere utilizzata a temperatura ambiente o riscaldata in forno a microonde per massimo 45-50 secondi a 750 W.

NON SURRISCALDARE. Controllare la temperatura prima dell'uso.

Modalità raccomandate per la detersione del corpo e l'igiene completa del paziente:

prelevare un panno alla volta per detergere ciascuna delle parti del corpo, gettare dopo l'uso.

NON GETTARE NEL WC.

Condizioni di stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto

Validità del prodotto: 24 mesi dalla data di produzione, in confezione integra.



Regolamentazione Europea CE: Normativa 1223:2009 sui prodotti cosmetici

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.

Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it