

**Art. Fasce di movimentazione – Sling e Smartmove**

<b>Codice Articolo</b>	IM428	IM426
<b>N°. Repertorio</b>	-	-
<b>Codice CND</b>	Y123099	Y123099

**Caratteristiche**

La fascia SLING dimostra grande efficacia operativa, può essere considerata l'estensione delle braccia degli operatori che con una corretta posizione e presa ergonomica possono fornire supporto al paziente in modo agevole e sicuro.

La fascia SMARTMOVE ha come obiettivo facilitare il passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta e viceversa.

**Impiego**

Ausili realizzati in materiale leggero, privo di spigolosità, per il sollevamento e trasferimento del paziente da un piano d'appoggio (letto) ad un altro, esempio: letto/carrozzina, carrozzina/sedia doccia, carrozzina/wc, carrozzina/auto.

**Target**

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA, domicilio.

**Controindicazioni**

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi.

**Avvertenze**


La mancata osservanza delle indicazioni riportate dal fabbricante può causare un uso improprio del prodotto. Non utilizzare utensili, strumenti da taglio o altri mezzi in grado di provocare modifiche di qualunque genere. Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato.

**Stoccaggio**

Proteggere dall'umidità, da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari.




**Caratteristiche Tecniche**

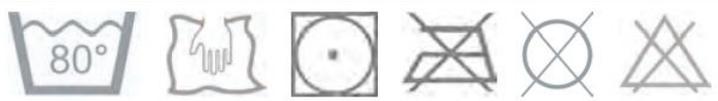Materiale impiegato	IM428 SLING - Esterno: nylon - Interno: nylon con rivestimento in PU - Imbottitura: poliestere - Maniglie: poliestere. IM426 SMARTMOVE - Esterno: nylon con rivestimento in poliuretano - Interno: polipropilene - Maniglie: poliestere.
Pulizia	 Non usare ammorbidenti o candeggina
Dimensione	IM428 – Sling - Dimens. Cm 16 x 190 mm – 4 maniglie per lato IM426 - Smartmove – Dimens. Cm 21 x 60 mm – 2 maniglie per lato
Pesi sopportati	Portata massima 150 Kg
Confezionamento:	Busta con 1 pezzo - Dispositivo Medico di Classe I – non sterile

**Modo d'Uso**

Indicato per pazienti con ridotte capacità motorie. Per pazienti con limitata autonomia è consigliabile l'affiancamento ed il supporto di uno o due operatori.

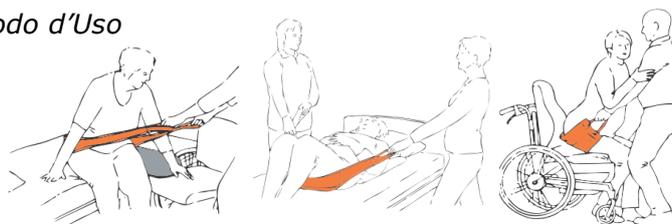

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

**COREMEC s.r.l**

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

[www.coremec.it](http://www.coremec.it)

e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti  
ST\_426\_428\_fasce\_movim\_r0 ed\_2020