

Mediwrap® Teli ad alta protezione monouso

I Teli ad Alta Protezione Mediwrap® sono utilizzati in tutto il mondo dagli ospedali civili e militari, dai servizi di ambulanza e di emergenza. Sono impiegati principalmente in ambiente ospedaliero, nel soccorso extraospedaliero e in occasione di catastrofi e disastri.

Impiego ospedaliero

Utilizzati in sala operatoria, sala risveglio, unità di terapia intensiva per conservare la normotermia del paziente prima, durante e dopo ogni tipo di intervento chirurgico.

Soccorso extraospedaliero

L'impermeabilità, la resistenza al vento e l'elevata assorbenza dei teli Mediwrap® prevengono la dispersione di calore per convezione e per irradiazione offrendo un'efficace soluzione per l'arresto dell'ipotermia alle vittime di incidenti e ai pazienti in situazioni di emergenza.

I Teli ad Alta Protezione Mediwrap® sono monouso, leggeri, compatti e ideali per ogni tipo di soccorso medico.

Disastri e catastrofi

I Teli ad Alta Protezione Mediwrap® rappresentano una soluzione estremamente efficace per mantenere le vittime calde e asciutte, riducendo al minimo il rischio di infezioni incrociate tipiche della biancheria tradizionale. Sono economici, leggeri e possono essere riposti anche in spazi limitati.



Art. 1002

Mediwrap® Telo ad Alta Protezione per adulti

Dimensioni prodotto: cm 120 x 200

Dimensioni confezione: cm 27 x 15 x 4

Confezione singola: busta trasparente

Peso confezione singola: 200 g

Confezione multipla: cartone da 50 pezzi

Peso confezione multipla: 11,40 Kg

Codice NATO: 6530-99-304-5060

Art. 1018

Mediwrap® Telo ad Alta Protezione pediatrico

Dimensioni prodotto: cm 120 x 150

Dimensioni confezione: cm 27 x 15 x 4

Confezione singola: busta trasparente

Peso confezione singola: 165 g

Confezione multipla: cartone da 50 pezzi

Peso confezione multipla: 9,10 Kg

Mediwrap® è un tessuto non tessuto innovativo frutto di una combinazione di fibre sintetiche e fibre naturali. Il Telo è composto da uno strato assorbente laminato ad un materiale termoriflettente per mezzo di un originale processo di saldatura atossico e privo di lattice. E' un prodotto economico che può essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è necessario l'impiego di una coperta.

Il Telo ad Alta Protezione Mediwrap® si utilizza con il lato morbido (assorbente) a contatto con il paziente e non necessita dell'impiego di ulteriori coperte o materiali protettivi.

- Arresta e stabilizza l'ipotermia
- Mantiene la normotermia senza l'ausilio di fonti esterne di calore
- 4 volte termoisolante:
 - isolante
 - previene la dispersione di calore per convezione
 - previene la dispersione di calore per evaporazione quando il paziente è bagnato
 - previene la dispersione di calore per irradiazione
- Confortevole e assorbente
- Protegge il personale e il paziente dal rischio di infezioni incrociate
- Privo di lattice e radiotrasparente
- Non conduttivo, può essere utilizzato in sicurezza durante l'elettrochirurgia, la diatermia e la defibrillazione
- Economico, efficace, monouso

Lo strato esterno del telo è impermeabile e resistente al vento. Lo strato interno è altamente assorbente. Ogni telo può assorbire fluidi organici oltre dieci volte il proprio peso, mantenendo il paziente caldo e asciutto.

Il materiale rappresenta una barriera antibatterica totale proteggendo lo staff e il paziente da infezioni incrociate.

Il tessuto è radiotrasparente e le immagini radiografiche non vengono alterate anche se il paziente viene avvolto in un doppio strato di Mediwrap®.



I Teli ad Alta Protezione Mediwrap® si utilizzano con il lato morbido a contatto con il paziente, devono coprire il corpo il più possibile, e devono essere rimboccati sotto il paziente per formare una barriera isolante.

Copyright 2002 - Edizione COREMEC S.r.l. EM18_2006_r1_ Riservati tutti i diritti

Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39-011-35.89.481 n.a. - Fax +39-011-35.89.483
www.coremec.it e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015