

Philly® Patriot®



Il collare cervicale multimisura regolabile Philly® Patriot® è disponibile sia nella versione **adulti** che in quella **pediatrica**.

Le molteplici posizioni (4 per il modello adulti e 3 per il modello pediatrico) si adattano pertanto all'anatomia della maggior parte dei pazienti.

Il collare Philly® Patriot® offre un'ottima immobilizzazione del rachide cervicale limitando i movimenti in flessione, estensione e rotazione.

Esso è costituito da una struttura rigida e resistente in polietilene ad alta densità rivestita internamente con uno strato in Volara® privo di lattice, atossico e ipoallergenico.

L'ampio foro tracheale consente di monitorare il polso carotideo e, in caso di necessità, di effettuare una tracheostomia d'urgenza.

La mentoniera preformata mantiene la posizione neutra.

I supporti mandibolari si adattano perfettamente al profilo individuale di ogni paziente.

Predisposizioni laterali per l'alloggiamento di occhialini per ossigenoterapia.

La zona posteriore del collare è provvista di una apertura di aerazione che favorisce il deflusso dei liquidi, garantisce una buona ventilazione e permette la palpazione del rachide cervicale.

Resistente all'acqua utilizzabile anche nelle condizioni climatiche più avverse.

Radiotrasparente, compatibile con TAC e RM.

Lavare con acqua e sapone neutro. Disinfettare con prodotti non aggressivi. Non utilizzare candeggianti. Asciugare completamente prima di riutilizzare.

| | |
|----|--|
| PP | Collare cervicale multimisura Philly® L'IL PATRIOT® Pediatrico, 3 altezze regolabili, circonferenza cm 20,5 ÷ 46 |
| PA | Collare cervicale multimisura Philly® PATRIOT® Adulti, 4 altezze regolabili, circonferenza cm 28 ÷ 58,5 |

Philly® Patriot®

Modo d'uso

MISURAZIONI E IDENTIFICAZIONE DELL'ALTEZZA DEL COLLARE



La determinazione della misura corretta del collare è importante per un'efficace immobilizzazione del rachide e per il comfort del paziente. Mantenere sempre il capo del paziente in posizione neutra.

Il presente modo d'uso è da intendersi esclusivamente come linea guida: attenersi sempre alle indicazioni di personale medico qualificato e ai protocolli locali per i collari per estricazione.

Prima di procedere alla misurazione assicurarsi che il capo del paziente sia in posizione neutra. Utilizzare le dita della mano per misurare la distanza verticale dal punto più alto della spalla alla punta del mento del paziente.



Posizionare il dito inferiore in corrispondenza della **SIZING LINE** indicata sul collare e selezionare la misura più vicina all'altezza delle dita (TALL-REGULAR-SHORT-LOW).

Nota: Un collare troppo basso potrebbe non fornire un adeguato supporto mentre uno troppo alto potrebbe causare iperestensione.



Mantenendo il collare regolato sulla misura prescelta, premere a fondo i perni di bloccaggio (LOCK) all'interno dei fori predisposti.

Per verificare il perfetto bloccaggio tentare di regolare l'altezza del collare: se si notassero movimenti ripetere la procedura. **Importante! Non applicare il collare al paziente prima di avere bloccato i perni.**



Per sbloccare il collare riportare i perni nella posizione iniziale premendoli dall'interno verso l'esterno.

APPLICAZIONE DEL COLLARE

La perfetta applicazione del collare è tanto importante quanto la scelta della misura corretta per ottenere un'ottima immobilizzazione del rachide cervicale e per garantire il massimo comfort al paziente.



Dopo avere individuato la taglia corretta applicare la parte anteriore del collare sul collo del paziente. Centrare il collare assicurandosi che il mento del paziente sia posizionato correttamente nel supporto mentoniero.

Se il paziente è in posizione supina, inserire dapprima la parte posteriore del collare al di sotto del collo fino a quando il Velcro sarà visibile e successivamente posizionare la mentoniera.



Avvolgere il collo del paziente. Prima di fissare il Velcro assicurarsi che il capo del paziente e il collare siano in posizione neutra. Fissare il Velcro sulla parte anteriore del collare. Se il mento non è sufficientemente sostenuto, serrare ulteriormente il collare. Se questo provocasse un'estensione del capo, scegliere un'altezza inferiore.

Copyright 2003 - Edizione COREMEC S.r.l. EM31_2006_r1_ Riservati tutti i diritti

Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483
www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015