

**Art. Teli di movimentazione e trasferimento, con maniglie - Miniboard**

<b>Codice Articolo</b>	IM8011054	IM8012454	IM8020054
<b>N°. Repertorio</b>	-	-	-
<b>Codice CND</b>	Y123099	Y123099	Y123099



**Caratteristiche**

I teli di trasferimento Miniboard sono ausili di supporto alla movimentazione del paziente per il trasferimento da un letto ad altro piano d'appoggio o viceversa. Trova indicazioni anche per sollevare e spostare il paziente in altre posizioni o sollevare da terra a seguito di caduta. La parte centrale dei teli Miniboard è dotata di imbottitura.

**Impiego**

Ausili realizzati in materiale leggero, privo di spigolosità, per ridurre al minimo l'attrito ed i punti di pressione movimentando e trasferendo il paziente.

**Target**

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA, domicilio.

**Controindicazioni**

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi.

**Avvertenze**

La mancata osservanza delle indicazioni riportate dal fabbricante può causare un uso improprio del prodotto. Non utilizzare utensili, strumenti da taglio o altri mezzi in grado di provocare modifiche di qualunque genere. Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato.

**Stoccaggio**

Proteggere dall'umidità, da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari.



**Caratteristiche Tecniche**

<b>Materiale impiegato</b>	Struttura: superiore ed inferiore in nylon - Imbottitura: polietilene - Maniglie: poliesteri - velcro
<b>Pulizia</b>	 <p>Non usare ammorbidenti o candeggina, aprire la zip velcro ed estrarre l'imbottitura.</p>
<b>Dimensione</b>	<p>IM8011054 - Telo di trasferimento Miniboard a 4 maniglie- cm 54 x 110</p> <p>IM8012454 - Telo di trasferimento Miniboard a 7 maniglie, con supporto testa - cm 54 x 124</p> <p>IM8020054 - Telo di trasferimento Miniboard a 11 maniglie, con supporto testa - cm 54 x 200</p>
<b>Pesi sopportati</b>	Portata massima 300 Kg
<b>Confezionamento:</b>	Busta con 1 pezzo - Dispositivo Medico di Classe I - non sterile

**Modo d'Uso**

Indicato per pazienti con ridotte capacità motorie e con limitata autonomia, è consigliabile l'affiancamento ed il supporto di uno o due operatori. Rimuovere il telo Miniboard dopo l'utilizzo.



Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

**COREMEC s.r.l.**

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

[www.coremec.it](http://www.coremec.it)

e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti  
ST\_Miniboard\_r0\_ed\_2020