


Art. Teli di movimentazione e trasferimento - Multiglide

Codice Articolo	IM160	IM168DR
N°. Repertorio	-	-
Codice CND	Y123099	Y123099

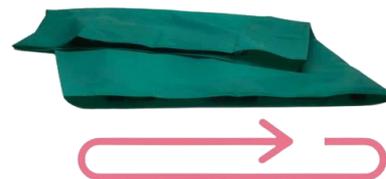

Caratteristiche

I teli di trasferimento Multiglide sono realizzati in versione tubolare ed il lato interno ha caratteristica di alto scivolamento. Trova indicazioni per sollevare e riposizionare il paziente a letto. Struttura impermeabile, antistatico.

Impiego

Ausili realizzati in materiale leggero, privo di spigolosità, per ridurre al minimo l'attrito ed i punti di pressione movimentando e riposizionando il paziente al letto.

Target

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA, domicilio.

Controindicazioni

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi.

Avvertenze

La mancata osservanza delle indicazioni riportate dal fabbricante può causare un uso improprio del prodotto. Non utilizzare utensili, strumenti da taglio o altri mezzi in grado di provocare modifiche di qualunque genere. Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato.

Stoccaggio


Proteggere dall'umidità, da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Caratteristiche Tecniche

Materiale impiegato	Struttura: nylon con rivestimento in poliuretano - Maniglie: in poliestere (ove presenti).
Pulizia	 <p>Non usare ammorbidenti o candeggina</p>
Dimensione	IM160 – Telo di trasferimento tubolare ad alto scorrimento, dim. Cm 160 x 80 IM168DR – Telo di trasferimento tubolare ad alto scorrimento, con maniglie - dim. Cm 160 x 80
Pesi sopportati	Portata massima 300 Kg
Confezionamento:	Busta con 1 pezzo - Dispositivo Medico di Classe I – non sterile

Modo d'Uso

Indicato per pazienti con ridotte capacità motorie e con limitata autonomia, è consigliabile l'affiancamento ed il supporto di uno o due operatori. Rimuovere il telo Multiglide dopo l'utilizzo.

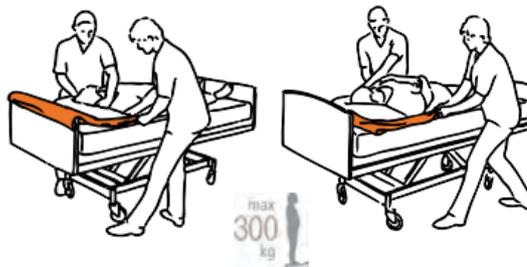

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
ST_Multiglide_r0_ed_2020