

Art. VTB00 – Vestaglia chirurgica monouso non sterile, colore blu

Codice Articolo	VTB00
N°. Repertorio	149831
Codice CND	T0205

LATEX FREE**GLASS FIBRE FREE**

1. Descrizione e destinazione d'uso

Vestaglia chirurgica monouso, per uso in ambiente sanitario ospedaliero, laboratori chimici, laboratori farmaceutici, etc., ad uso del team sanitario e/o dei pazienti.

Con polsino in cotone lavorato a maglia e cintura cucita sul lato anteriore; non sterile.

2. Materiali e composizione

Vestaglia – corpo lacci al collo e cintura: Polypropylene tessuto-non-tessuto

– lacci al collo: Polypropylene tessuto-non-tessuto

- cintura addominale: Polypropylene tessuto-non-tessuto

- Polsino: in cotone lavorato a maglia

Colore: Polypropylene tessuto-non-tessuto blu

Peso: Polypropylene tessuto-non-tessuto 25 g/m²

3. Costruzione e assemblaggio

L'intero bordo esterno della vestaglia è cucito in overlocking (larghezza max4 mm).


La resistenza alla trazione della cucitura è superiore a quella del tessuto senza riguardo al senso di trazione.

4. Istruzioni d'uso


Indossare la vestaglia, posizionando correttamente i polsini, chiudere i lacci posteriori al collo, chiudere la cintura addominale sovrapponendo i lembi della vestaglia. Lacci e cintura si chiudono realizzando fiocco semplice, rapido anche da sciogliere.



5. Schema del prodotto

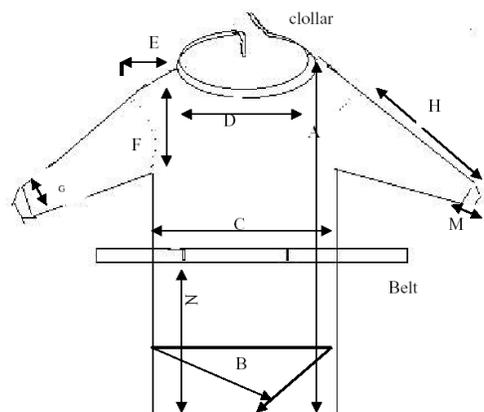

Size	Body	A	B	C	D	E
(unit:cm)		120(+/-2)	140(+/-2)	68(+/-2)	22(+/-2)	22(+/-2)
	Sleeve	F	G	H	M	N
	&cuff	27(+/-2)	15(+/-2)	58(+/-2)	5.5(+/-1)	67(+/-1)
	collar	I	J			
		110(+/-2)	0.8			
	belt	K	L			
		180(+/-2)	0.8			

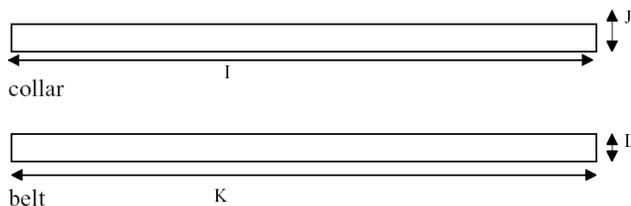

6. Requisiti

Cessione particelle: nessuna cessione di particelle (riferite ai componenti e/o al colore) in fase di corretto uso.

7. Confezionamento

Box: da 20 pezzi – non sterili – (compatibili eventualmente per sterilizzazione R)

Etichetta: conforme alla direttiva CEE 93/42 – classe I

Made/Manufacturing in P.R.C.

8. Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto.

Validità 5 anni dal confezionamento.