

CS Prone Plus - Supporto per posizione prona

N°. Repertorio	N.A. in quanto di produzione estera
Codice CND	Y033399

Codice articolo: CSM2565

CS Prone Plus Head Support System - Supporto per il capo in pronazione
conf. 1 pezzo

Caratteristiche e Impiego

Casco e specchio per l'impiego in posizione prona
Casco realizzato in plastica ABS con specchio acrilico separabile,
include 4 fissaggi regolabili

Istruzioni

- Riutilizzabile
 - Il casco sostiene il cuscino per il viso CS Prone Plus o il cuscino per il viso CS per bambini per mantenerne l'integrità durante le procedure in posizione prona.
 - Spazio per il posizionamento sicuro dei tubi ET.
 - Il casco può essere utilizzato con o senza specchietto
 - Lo specchio consente al medico di monitorare gli occhi e il tubo del paziente durante la procedura
 - I perni filettati posizionati ai quattro angoli dello specchio vengono utilizzati per regolare l'altezza o l'angolazione del casco per ottenere una posizione del collo il più naturale e sicura possibile
 - Pulire il casco con salviette analcoliche o acqua calda e sapone
 - Pulire lo specchio con salviette analcoliche o acqua calda e sapone
- Numero di utilizzi: illimitato, soggetto a danni
- Senza lattice e ftalati
 - Le istruzioni per l'uso si trovano sulla base dello specchio



Codice articolo: CSM2512 adulti - CSM2514 pediatr.

Cuscino pronazione per il viso - In schiuma di poliuretano
conf. 10 pezzi

Caratteristiche e Impiego

Supporto per il viso del paziente in posizione prona

Istruzioni

- Monouso
- Da utilizzare con il sistema di supporto per la testa CS Prone Plus e altri sistemi di supporto per la testa compatibili
- Distribuisce la pressione sulle guance e sulla fronte del paziente in posizione prona
- Riduce l'incidenza di ulcere da pressione e segni
- Per i pazienti di età pari o superiore a 8 anni, a seconda della statura
- Per pazienti di peso fino a 200 kg
- Senza lattice e ftalati
- Le istruzioni per l'uso sono confezionate con il prodotto

Target

Sala Operatoria e Reparti di rianimazione

Stoccaggio

- Trasportare e conservare in condizioni asciutte e al riparo dalla luce diretta ove possibile
- L'esposizione alla luce può causare l'ingiallimento di alcune aree del prodotto. Il difetto è puramente estetico e non influenzerà la qualità o la sicurezza del prodotto

Produttore: Care Surgical - UK

Dispositivo Medico Classe I

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.
La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483
www.coremec.it e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it