

COR-Hygienic Shampoo Cap *Sistema di lavaggio igienizzante per capelli*

Codice Articolo	CHW1.S
Regolam. Europeo	CE 1223/2009
CPNP Ref.	2323016

Sistema monouso per il lavaggio igienizzante dei capelli del paziente, shampoo e balsamo.
Cor-Hygienic Shampoo Cap rappresenta la soluzione ideale per l'impiego in ambiente sanitario-ospedaliero e domiciliare.

Art. CHW1.S Confezionato singolarmente in buste da 1 cuffia shampoo - Cartone da 24 buste

Indicazioni d'uso e peculiarità:

Sistema monouso per un efficiente lavaggio e detersione dei capelli del paziente allettato, pulisce, rinfresca, idrata e protegge. Senza risciacquo.

La cuffia rivestita internamente con materiale in grado di trattenere la soluzione fino al momento dell'impiego, consente di contenere anche le folte capigliature. Lo strato esterno della cuffia evita la dispersione dei liquidi durante la fase di lavaggio.

La soluzione detergente si dimostra efficace anche per l'azione anti-odore.

Materiali e composizione:

Cuffia in tessuto non tessuto, piegata per velocità di utilizzo.

Dimensioni cuffia diam. mm 490 ($\pm 2\%$)

Peso 110 g/m² $\pm 8\%$

Soluzione imbibente: 30,25 gr x cuffia $\pm 2\%$

Ingredienti:

Aqua, isostearamidopropyl morpholite lactate, propylene glycol, myristamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate, phenoxyethanol, polyaminopropyl biguanide, parfum, benzyl salicylate.

Confezionamento:

Busta dispenser realizzata con il migliore materiale disponibile in commercio dedicato a prodotti umidificati: minima evaporazione, massima integrità e durata del prodotto.

Indicazioni d'uso multilingua, italiano incluso. Simbologia internazionale in etichettatura.

Dimensioni busta dispenser mm 235 x 125 x 33 - 189 g $\pm 5\%$

Riscaldamento del prodotto:

La busta dispenser può essere utilizzata a temperatura ambiente o riscaldata in forno a microonde per massimo 45-50 secondi a 750 W.

NON SURRISCALDARE. Controllare la temperatura prima dell'uso.

Modalità raccomandate per la detersione dei capelli del paziente:

Massaggiare la testa e i capelli. Non risciacquare, gettare dopo l'uso.

NON GETTARE NEL WC.

Condizioni di stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto.

Condizioni di smaltimento dell'imballaggio: smaltire secondo indicazioni del comune prendendo come riferimento l'etichettatura ambientale presente sugli imballaggi.

Condizione di smaltimento del prodotto: non riciclabile e non pericoloso, smaltire nella raccolta indifferenziata, rifiuti urbani non pericolosi.

Validità del prodotto: 24 mesi dalla data di produzione, in confezione integra.



Regolamentazione Europea: Normativa 1223:2009 sui prodotti cosmetici

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.
Coremec s.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it

**COREMEC s.r.l.**

Export Department

e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti - ST_CHW1.S_R revisione 2 Maggio 2025