

Codice Articolo	DEA-Soft
N°. Repertorio	81272
Codice CND/EMDN	V080301

Caratteristiche

Cuscino antidecubito per seduta in materiale tecnico, con imbottitura in foam ad elevata densità e materiale viscoelastico con proprietà di memoria. Fodera ignifuga in classe 1 IM . impermeabile, traspirante, lavabile e sterilizzabile. Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in regione sacrale.

Impiego

Utilizzare solo su pazienti vestiti.

Target

Reparti di degenza, rianimazioni, lungodegenza, case protette, RSA. È previsto l'utilizzo da parte del personale sanitario.

Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente. Non esporre a fonti di calore dirette. Nel caso i prodotti presentino usure, rotture o danni o risultino contaminati devono essere sostituiti.

Smaltimento

Il prodotto, se non contaminato, può essere smaltito nei rifiuti comuni rispettando le vigenti normative in materia.

Controindicazioni

Non usare con pazienti che presentano ferite non medicate o abrasioni.

Non utilizzare su pazienti con ipersensibilità soggettiva verso i componenti impiegati.

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi, combattivi e con propensione al suicidio.

Non adatto per pazienti con presenza di processi di decubito (dal I al IV grado scala Norton).

Caratteristiche Tecniche

Materiale impiegato	Imbottitura: - foam (altezza 25 mm) - materiale viscoelastico (altezza 65 mm)
Pulizia	- Pulizia fodera: come indicato sulla targhetta. Lavabile con l'utilizzo dei comuni detersivi e l'impiego di acqua ossigenata. Sterilizzabile a 134 °C per un tempo massimo di 7 minuti. - Pulizia viscoelastico: pulire con un panno umido.
Dimensione e peso	430x430x90 mm; 1 kg
Confezione	Confezionato singolarmente

Modo d'Uso

- Posizionare il cuscino DEA-Soft sulla carrozzina o sulla sedia con la cerniera della federa rivolta verso lo schienale e con il lato superiore come indicato dall'etichetta
- Si consiglia l'utilizzo del cuscino DEA-Soft con la federa in dotazione;
- Per assicurare la massima durata del prodotto, si raccomanda di conservare il cuscino steso nella sua scatola;
- Se il cuscino è stato in ambienti con temperature inferiori ai 15°C o superiori ai 40°C, mantenerlo per qualche minuto a temperatura ambiente prima dell'utilizzo.

LATEX FREE**MADE IN ITALY****Dispositivo Medico di Classe I**

L'utilizzatore e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione ai dispositivi a DEA s.r.l e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito. Nel caso dell'Italia le segnalazioni vanno fatte pervenire al Ministero della Salute.

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.

DEA S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.



Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale

C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)

Tel. +39-011-35.89.478 - Fax +39-011-35.89.479

Website: www.deatorino.it e-mail: info@deatorino.it

DEA s.r.l.

Export Department

e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti - ST_DEASOFT Revisione 3 - Luglio 2024