





garanzia  
2  
anni

# Nelo



Posizionatori universali per il comfort del paziente

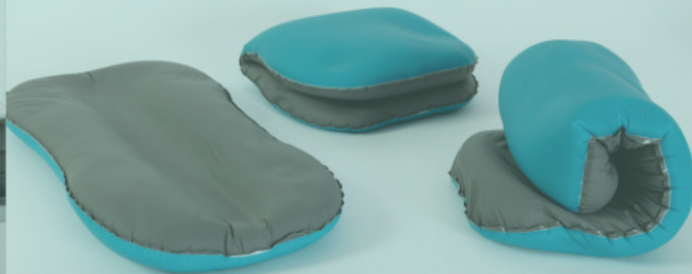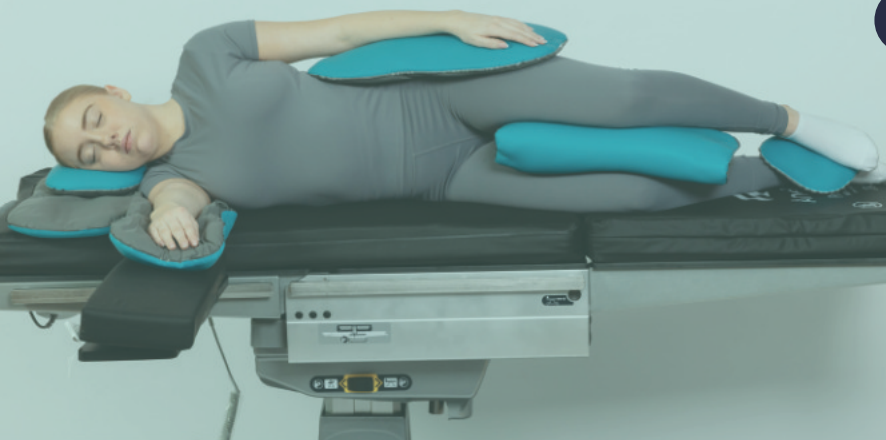

# Nelo

Supporto adattivo. Protezione stabile.



Supporta il posizionamento neutro del corpo



Supporti modellabili per il controllo e il sollievo della pressione sui tessuti, con caratteristiche anti-affondamento.



Facile da pulire e semplice da manovrare



# Peculiarità dei materiali


---

- La composizione prevede uno strato di silicone medicale ed uno di polimeri di silicone, incapsulati con film di poliuretano.
- La realizzazione a doppio strato offre una sensazione morbida simile alla pelle, con il silicone tipico di tutti i prodotti Trulife PressureCare, con l'effetto anti-affondamento.
- Sotto la pellicola grigia è presente un polimero siliconico che conferisce a Nelo la sua malleabilità.



# Supporto Adattivo

Nelo è versatile. Può essere manipolato per sostenere una qualsiasi parte del corpo, offrendo al contempo **stabilità, comfort, sollievo e la posizione corporea neutra** necessaria.

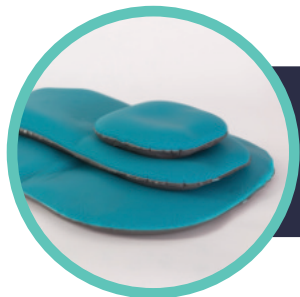

Nelo è disponibile in 3 misure: **small, medium e large**.  
Queste misure offrono supporto e stabilità ottimali a tutte le parti del corpo

Nelo ha un **design a doppio strato** che garantisce l'**anti-affondamento**.  
Questo fornisce un sollievo costante alla pressione sui tessuti.



# Protezione Stabile

Nelo è realizzato con materiali affidabili, di alta qualità e resistenza che garantiscono il massimo livello di sicurezza e comfort.





Nelo può essere impilato, consentendo un support o in linea con le esigenze personalizzate dei pazienti. Questo permette anche l'integrazione della gestione delle vie aeree, ecc.

La caratteristica forma a nido che assume Nelo crea una forma avvolgente di contorno alla porzione corporea interessata, offrendo supporto e stabilità extra.



# Miglior sollievo con Nelo

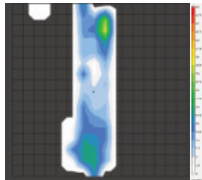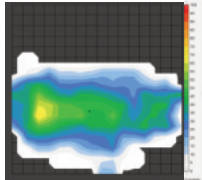

|        | Nelo                                                                              | Valutazione                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Small  |  | Il tallone di un paziente di 90 kg sul piccolo Nelo è stato mappato per il controllo delle pressioni. Il dato rilevato dimostra una pressione uniforme distribuita uniformemente verso l'esterno, con basso stress nelle aree target. |
| Medium |  | L'avambraccio di un paziente di 90 kg sul Nelo medium è stato mappato per il controllo delle pressioni. Il dato rilevato dimostra l'assenza di alti punti di pressione                                                                |
| Large  |  | Il torace di un paziente di 90 kg sul Nelo large è stato mappato per il controllo delle pressioni. Il dato rilevato dimostra l'ampia superficie di appoggio senza punti di pressione concentrati.                                     |

\* Risultati dopo 2 ore di utilizzo

# Un uso Versatile e Semplificato.

---

## Small - NE100 180x180x45mm

Fornisce una protezione mirata per aree ad alto rischio, aiutando a ridurre la pressione in zone più piccole o localizzate, inclusi testa, caviglie e talloni.



## Medium - NE200 240x490x40mm

Garantisce copertura e comfort equilibrati, ridistribuendo la pressione per aiutare a prevenire la degradazione cutanea nelle aree più a rischio come il gomito e le ginocchia.



## Large - NE300 440x590x40mm

Offre la massima copertura di superficie e la redistribuzione della pressione, supportando il comfort del paziente ed aiutando a proteggere la pelle vulnerabile su aree più ampie come la schiena e dietro le ginocchia.







Per maggiori informazioni è possibile contattare il distributore locale:

**COREMEC s.r.l. C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO) - Italy**

**Tel.: 011.35.89.481 r.a. - Email: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it) - Website/App: [www.coremec.it](http://www.coremec.it)**



[www.trulife.com](http://www.trulife.com)

